


als Facharzt ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen der Beibehaltung von Routine und der Einführung von Innovationen zu finden, um eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten. Aus diesem Grund ist die Benutzerfreundlichkeit für jeden medizinischen Fortschritt von entscheidender Bedeutung - um eine nahtlose Integration zu gewährleisten, ohne Ihre etablierten Routinen zu stören.

Hier kommt der SuperSeton ins Spiel - eine knotenlose Seton-Innovation, bei deren Entwicklung der Patient im Mittelpunkt stand und die gleichzeitig einen bemerkenswert einfachen Anwendungsprozess bietet. Diese benutzerfreundliche Lösung für die Fisteldrainage ist die ideale Wahl für Kolorektalspezialisten, die die Ergebnisse für ihre Patienten verbessern und eine bessere Versorgung gewährleisten möchten.


So einfach geht es

Der SuperSeton kann in diesen einfachen Schritten angewendet werden:

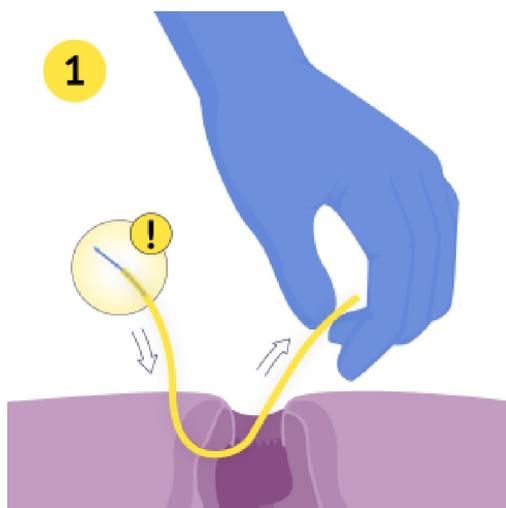


EINFÜHREN

Setzen Sie den SuperSeton wie ein normales Seton ein.

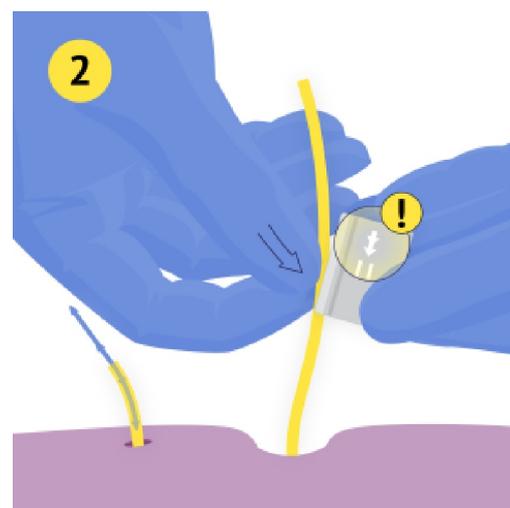


HALTEN

Legen Sie das Seton in den Applikator für eine präzise Handhabung.

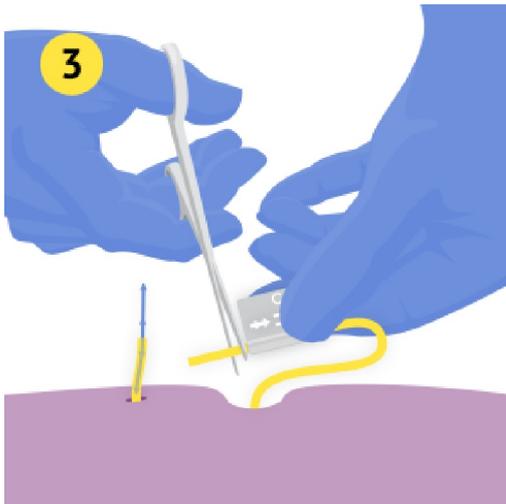


KÜRZEN

Schneiden Sie den SuperSeton auf die passende Größe zu.

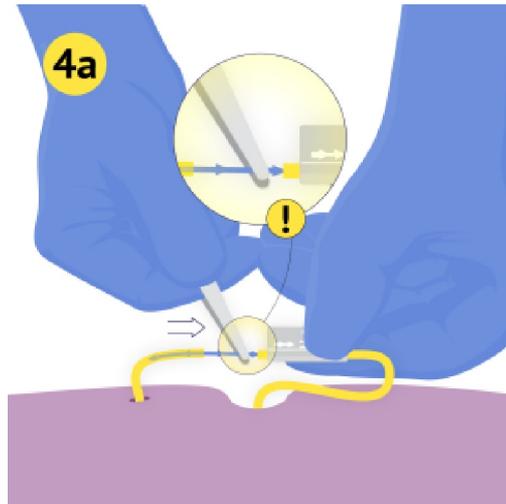


VERBINDEN

Schließen Sie das Seton mit einer breiten Pinzette in ein paar sanften Schritten.

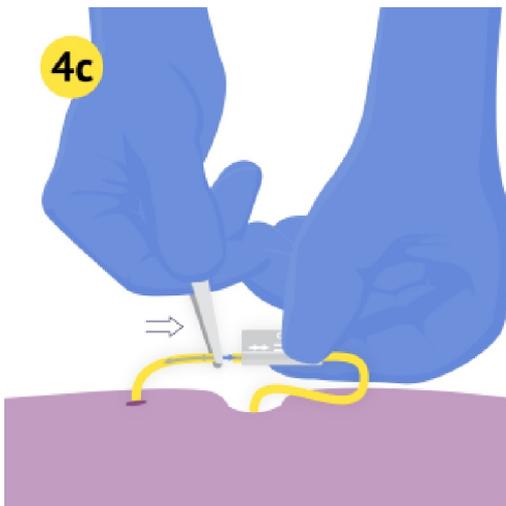

VERBINDEN >>

Fahren Sie mit dem Schliessen fort, bis die Verbindung vollständig ist. Die Konstruktion mit 2 Anker gewährleistet eine sichere Verbindung.

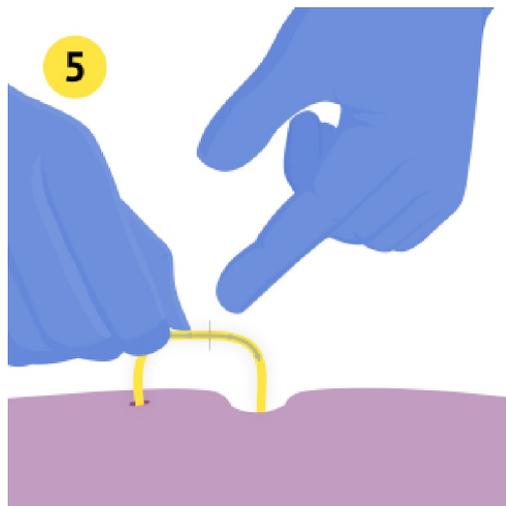

KONTROLLE

Stellen Sie abschliessend sicher, dass der SuperSeton vollständig geschlossen ist.
